

Información del producto: 20570

Desinfección y Limpieza

- Desinfección lista para usar y de acción rápida. Sin alcohol.
- Toallita de desinfección extra grande empapada.
- Hasta 3m² se desinfectan con una sola toallita.
- Seguridad mejorada debido al efecto restante.
- Excelente actividad bactericida, fungicida y viricida.
- No contiene aldehídos ni fenoles.
- Testado dermatológicamente con altas calificaciones.
- Son efectivas después de 1 minuto.



CE
0481

RHEOSEPT-WDplusWipes

Toallitas desinfectantes sin alcohol

Descripción del producto

Toallitas de desinfección empapadas. Efectivas después de 1 minuto. Muy buena capacidad de limpieza. No daña el material. Adecuado para superficies impermeabilizadas incluido vidrio acrílico. Aroma agradable. Dispensación completa de líquido de remojo activo para asegurar la desinfección. Sin consumo de líquido activo por el material de limpieza.

Campos de aplicación

Desinfección de acción rápida mediante un proceso de limpieza para todas las superficies resistentes al agua de productos médicos, tales como superficies de dispositivos electrónicos, asientos, mesas de examen, sartenes, camillas. Adecuado para materiales como plásticos, lacas, cerámicas, vidrio acrílico, vidrio plexiglas, etc.

Instrucciones de uso

Limpie las superficies a fondo. Asegúrese de que las superficies estén completamente humedecidas para garantizar una desinfección completa. Después del tiempo de residencia utilice un paño de un solo uso. Después del uso de los paños deséchelos como corresponda. Se recomienda el uso de guantes. ¡ No lo utilice para limpiar la piel !

Actividad

Actividad: Bactericida, fungicida y viricida (HIV, HBC, HCV, noro, rota, vaccinia, BVDV).

RHEOSOL®

Tiempos de contacto

Especificaciones	Dosificación	Observación
60 segundos	Sin diluir	Bactericida/ fungicida EN 1276,EN 13697,EN 1650
5 minutos	Sin diluir	bactericida/fungicida(VAH)baja carga/mecánica.
60 segundos	Sin diluir	Virus con envoltura(HIV,HBV,HCV,BVDV,v accinia,influenza)EN 14476
30 minutos	Sin diluir	noro-virus (MNV)EN14476
60 segundos	Sin diluir	rotavirus
5 minutos	Sin diluir	poliomavirusSV40

Composición

100gr.contienen: 0,25gr. de cloruro de dialquildimetil amonio, 0,25gr. de cloruro de benzalconio, 025gr. de cloruro de alquildimetil(etilbencil) amonio.

Otros Ingredientes: Aromas limoneros.

Datos Físico-Químicos

- pH-valor 7

Formas de presentación

REF.	Nº de Toallitas	Pack toallitas /caja
20570003	RHEOSEPTWDplusWipes 48 toallitas(300x270mm)	6
20570011	RHEOSEPTWDplusWipes mini 30 toallitas(200x180mm)	24

Registros

Este producto médico tiene certificación CE (CE0481).

Seguridad

Este producto no es peligroso de acuerdo con las directivas europeas sobre sustancias peligrosas. Debido a su composición no se conocen riesgos laborales en su manipulación. No se ha detectado alergias o enfermedades al manipular el producto. Anote el nº de lote y fecha de caducidad impresos en el embalaje.

Fecha de caducidad: 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

Certificado e Información

Para obtener información adicional sobre este producto, consulte: www.rheosol.com. Para preguntas específicas o información sobre informes de expertos, comuníquese con el personal de nuestra oficina:

Teléfono:+492241-3923-70 , E-mail:info@rheosol.de.

Información ambiental

NW-ChemieGmbH fabrica bajo la aplicación de procedimientos avanzados, seguros,y respetuosos con el medio ambiente y de conformidad con los estándares de alta calidad.

Distribuidor

SLEEPOVER ESPAÑOLA S.A.

Teléfono: 96 3520427